

Krzesło toaletowe

AT51026



Krzesło toaletowe z regulacją wysokości to nowoczesny produkt zaprojektowany z myślą o osobach z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, montaż, którego jest szybki, łatwy i nie wymaga narzędzi. Produkt wykonany jest ze stabilnej ramy stalowej malowanej proszkowo, wyposażonej w miękkie i wygodne podłokietniki. Nogi krzesła zakończone są antypoślizgowymi stopkami zapewniającymi stabilność. W zestawie znajduje się wiadro z pokrywką oraz deska sedesowa z pokrywką. Produkt jest łatwy w obsłudze i wygodny do złożenia na czas transportu czy w celu przechowywania.

Charakterystyka produktu:

- stalowy, malowany proszkowo stelaż
- miękkie, wygodne podłokietniki
- możliwość regulacji wysokości
- antypoślizgowe stopki
- wiadro z pokrywką
- łatwa w utrzymaniu czystości deska sedesowa

Zastosowanie

Krzesło toaletowe pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych pacjentom zmuszonym do przebywania w łóżku. Może być stosowane w bezpośredniej bliskości łóżka lub miejsca, w którym przebywa pacjent o ograniczonych możliwościach ruchowych. Ponadto, krzesło można stosować bez wiadra nad sedesem w toalecie.

Uwagi i ostrzeżenia

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

NIE STOSOWAĆ, JEŻELI WAGA UŻYTKOWNIKA PRZEKRACZA 100 KG.

PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA PROMIENI SŁONECZNYCH I ŹRÓDŁA CIEPŁA.

KRZESŁO TOALETOWE PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKOWANIA NA PŁASKICH I RÓWNYCH POWIERZCHNIACH.

NIEDOPUSZCZALNE JEST STAWIANIE NA KRZESŁE TOALETOWYM.

REGULARNIE SPRAWDZAĆ SPRZĘT POD KĄTEM USZKODZEŃ I ZUŻYCIA. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK USZKODZEŃ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:


- a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Użytkowanie

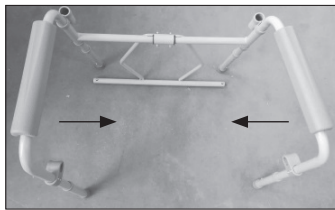

rys. 1.1

1. Wyjmij produkt z opakowania. Rozłóż ramę krzesła tak, aby boczne podłokietniki były ustawione równolegle względem siebie (rys. 1.1).
2. W celu ustabilizowania ramy krzesła należy umieścić poprzeczkę z miejscem na wiadro w przygotowanych zatrzaskach. Należy sprawdzić czy zatrzaski właściwie zablokowały się w ramach bocznych.
3. W tylnej części krzesła, w odpowiednio przygotowanych otworach umieszczamy barierkę zapobiegającą opadaniu pokrywy deski sedesowej do tyłu. Barierkę montuje się przy pomocy zatrzasków.
4. W celu zmiany wysokości krzesła należy wyregulować wysokość każdej nogi oddzielnie przy pomocy zatrzasku znajdującego się na każdej nodze krzesła. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że nogi mają identyczną wysokość oraz czy są stabilne.
5. Umieść wiaderko w specjalnie przygotowanym dla niego miejscu, pomiędzy metalowymi barierkami.
6. W celu montażu deski należy docisnąć ją w dwóch miejscach do tylnej ramy poprzecznej. Następnie należy przymocować pokrywę sedesową do tylnej ramy poprzecznej.
7. Przed użytkowaniem należy upewnić się, że plastikowe klipsy mocujące zostały prawidłowo przymocowane oraz, że pokrywa i deska sedesowa znajdują się prawidłowej pozycji.

Konserwacja wyrobu

1. Po każdorazowym użyciu opróżnić i zdezynfekować pojemnik i deskę sedesową w celu uniknięcia zakażenia.
2. Stelaż krzesła czyścić za pomocą wody i środków czystości (unikać substancji o działaniu żrącym).
3. Podłokietniki czyścić przy pomocy łagodnych środków czystości.
4. Nieużywany produkt powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu.

Parametry techniczne

Typ: składane

Materiał: stal malowana proszkowo, tworzywo sztuczne

Waga całkowita: 6,6 kg

Wysokość minimalna od podłoża do podłokietników: 58 cm

Szerokość całkowita: 74 cm

Szerokość pomiędzy dolnymi nogami: 49 cm

Wysokość minimalna siedziska: 35 cm

Wysokość maksymalna siedziska: 50 cm

Maksymalna masa użytkownika: 100 kg



TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA

Sposób utylizacji wyrobu po wycofaniu z eksploatacji

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Serii:

Pieczęć punktu sprzedaży
i czytelny podpis Sprzedawcy:

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
2. W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3. ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebiecia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub olejowymi, benzyną.
7. Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.
8. NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCCNICZE”.
9. Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net

